



PEMERIKSAAN CHOLESTEROL			SOP	
No. Dokumen : 445/PKM-KPR/VII/2017/				
No. Revisi :				
Tanggal terbit : 27-07-2020				
Halaman : 1/2				
UPTD Puskesmas Kampar		dr. ALIMORA NIP. 19711123 200312 1 003		
1. Pengertian	Serangkaian tindakan untuk pemeriksaan kolesterol.			
2. Tujuan	Untuk Mengetahui kadar kholesterol dalam darah.			
3. Kebijakan	Surat keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kampar Nomor SK/PKM-KPR/UKP-VIII/150 Tentang Jenis-jenis Pemeriksaan Laboratorium.			
4. Referensi				
5. Langkah-langkah/ Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat dan Bahan <ol style="list-style-type: none"> a. Lancet b. Easy touch c. Alkohol swab d. Strip kolesterol easy touch e. Darah kapiler f. Tissue g. Perlak dan pengalas 2. Langkah-langkah <ol style="list-style-type: none"> a. Cek order dokter b. Cuci tangan dengan bersih c. Persetujuan dengan pasien d. Bawa alat dekat pasien e. Pasang sampiran f. Pasang perlak dan pengalas dibawah jari yang akan ditusuk g. Nyalakan mesin easy touch dan pastikan sudah menyala dengan baik h. Pasang strip kolesterol secara benar dan pastikan alat sudah on. i. Lakukan pemilihan jari untuk pemeriksaan kolesterol. j. Oleskan alcohol swab pada jari yang akan ditusuk k. Tusuk ujung jari pasien secara hati-hati l. Tekan daerah sekitar tusukan dengan jari kita agar darah keluar, pastikan darah keluar secukupnya, tetesan darah pertama yang keluar dilap dengan tissue. m. Tetesan darah berikutnya teteskan pada ujung strip kolesterol. n. Tunggu selama 150 detik untuk melihat hasil pada layar. 			
6. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poliklinik/Rawat Jalan 2. UGD 3. Rawat Inap 4. Laboratorium 			

7. Dokumen Terkait					
8. Rekaman Historis Perubahan					
	No	Halaman	Yang Dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.