
	PEMERIKSAAN ASAM URAT		
	SOP	No. Dokumen : 445/PKP-KPR/I/2020/	
		No. Revisi :	
		Tanggal terbit : 27/01/2020	
Halaman : 1/2			
UPTD Puskesmas Kampar			dr. ALIMORA NIP. 19711123 200312 1 003
1. Pengertian	Serangkaian tindakan untuk pemeriksaan asam urat.		
2. Tujuan	Untuk Mengetahui kadar asam urat dalam darah.		
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kampar Nomor SK/PKM-KPR/UKP-VIII/ 150 Tentang Jenis-jenis Pemeriksaan Laboratorium.		
4. Referensi	Buku pedoman Laboratorium Klinik , R. GandaSoebrata		
5. Langkah-langkah/ Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat dan Bahan <ol style="list-style-type: none"> a. Lancet b. Easy touch c. Alkohol swab d. Strip asam urat easy touch e. Darah kapiler f. Tissue g. Perlak dan pengalas 2. Langkah-langkah <ol style="list-style-type: none"> a. Cek order dokter b. Cuci tangan dengan bersih c. Persetujuan dengan pasien d. Bawa alat dekat pasien e. Pasang sampiran f. Pasang perlak dan pengalas dibawah jari yang akan ditusuk g. Nyalakan mesin easy touch dan pastikan sudah menyala dengan baik h. Pasang strip asam urat secara benar dan pastikan alat sudah on. i. Lakukan pemilihan jari untuk pemeriksaan asam urat. j. Oleskan alkohol swab pada jari yang akan ditusuk. k. Tusuk ujung jari pasien secara hati-hati l. Tekan daerah sekitar tusukan dengan jari kita agar darah keluar, pastikan darah keluar secukupnya, tetesan darah pertama yang keluar dilap dengan tissue. m. Tetesan darah berikutnya teteskan pada ujung strip asam urat. n. Tunggu beberapa detik untuk melihat hasil pada layar. 		
6. Hal yang Perlu Diperhatikan			
7. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poliklinik/Rawat Jalan 2. UGD 3. Rawat Inap 4. Laboratorium 		
8. Dokumen Terkait	Register Harian Laboratorium		

9. Rekaman
Historis
Perubahan

No	Halaman	Yang Dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.