


	<b>PEMERIKSAAN KEJERNIHAN URIN</b>			
	<b>SOP</b>	No. Dokumen		: 445/PKM-KPR/I/2020/
		No. Revisi		:
		Tanggal terbit		: 27-07-2017
Halaman		:		
UPTD Puskesmas Kampar		<b><u>dr. ALIMORA</u></b> NIP.19711123 200312 1 003		
1. Pengertian	Tidak semua macam kekeruhan bersifat abnormal, urin normalpun akan menjadi agak keruh jika dibiarkan atau didinginkan, kekeruhan ringan itu disebut Nubecula dan terjadi dari lendir, sel-sel epitel dan leukosit yang lambat laun mengendap.			
2. Tujuan	Untuk menentukan apakah urin tersebut telah keruh pada waktu dikeluarkan atau setelah didiamkan			
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kampar Nomor SK/PKM-KPR/UKP-VIII/ 150 Tentang Jenis-jenis Pemeriksaan Laboratorium.			
4. Referensi	1. Pusat Laboratorium Kesehatan bekerjasama dengan Dit.Jen Binkesmas, Petunjuk Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas, 1992. 2. R. Gandasoebrata, Penuntun Laboratorium klinik, cetakan kesebelas, P.T. Dian Rakyat, 2004.			
5. Langkah-langkah/ Prosedur	1. Alat dan Bahan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pot urin</li> <li>b. Pipet tetes</li> <li>c. Tabung reaksi</li> <li>d. Spidol</li> <li>e. Kertas label</li> </ol> 2. Langkah-langkah <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masukkan urin kedalam tabung reaksi yang bersih sebanyak <math>\frac{3}{4}</math> bagian tabung.</li> <li>b. Dilihat dengan latar belakang hitam dan dengan penerangan cahaya matahari.</li> <li>c. Dilihat kejernihannya, apakah terdapat kekeruhan.</li> <li>d. Pelaporannya dinyatakan dengan jernih, agak keruh, keruh atau sangat keruh.</li> </ol> <b>NILAI NORMAL</b> : urin yang baru dikeluarkan tidak berwarna/jernih.			

6. Diagram Alur	 <pre> graph TD     A([Masukkan urin kedalam]) --&gt; B[lihat dengan latar belakang hitam dan dengan penerangan cahaya]     B --&gt; C([Dinyatakan normal bila urin yang baru dikeluarkan tidak berwarna/jernih]) </pre>															
7. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poliklinik/Rawat Jalan</li> <li>2. UGD</li> <li>3. Rawat Inap</li> <li>4. Laboratorium</li> </ol>															
8. Rekaman Historis Perubahan	<table border="1" data-bbox="542 1034 1414 1206"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Halaman</th> <th>Yang Dirubah</th> <th>Perubahan</th> <th>Diberlakukan Tgl.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Halaman	Yang Dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.										
No	Halaman	Yang Dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.												

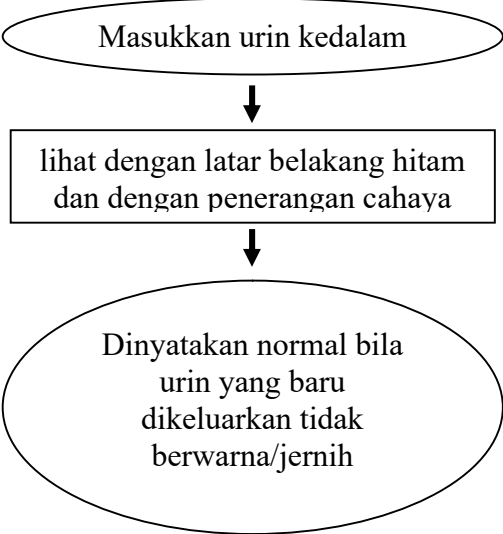