





PEMERIKSAAN HIV





SOP

No. Dokumen	: 445/PKM-KPR/I/2020/
No. Revisi	:
Tanggal terbit	: 27-01-2020
Halaman	: 1/2

UPTD Puskesmas Kampar	<u>Drg. Rita Herawati</u> NIP.197501012005012012																		
1. Pengertian	AIDS Adalah kumpulan gejala atau penyakit yang disebabkan oleh menurunnya kekebalan tubuh akibat infeksi oleh virus HIV yang termasuk family retroviridae, aids merupakan tahap akhir dari infeksi hiv																		
2. Tujuan	Untuk mendeteksi virus hiv dalam serum atau plasma dan mendukung dignosa infeksi virus hiv																		
3. Kebijakan	SK Kepala UPTD Puskesmas Kampar Nomor SK/PKM-KPR/UKP-VIII/150 Tentang Jenis-jenis Pemeriksaan Laboratorium.																		
4. Referensi	Buku panduan pemeriksaan laboratorium puskesmas																		
5. Langkah-langkah/ Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat dan Bahan <ol style="list-style-type: none"> a. Reagen HIV b. Lancet c. Alkohol pad d. Mikro pipet e. Darah vena/ kapiler f. Lancet/ spuit g. Tissue 2. Langkah-langkah <ol style="list-style-type: none"> a. Keluarkan reagen caasate dari bungkusnya b. Tulis identitas pasien c. Ambil darah vena atau darah kapiler d. Kemudian teteskan darah 20 ul ke dalam sumur cassate e. Tambahkan reagen 4 drop f. Tunggu selama 15 menit g. Hasil : non reaktif : jika muncul satu garis merah : reaktif : jika muncul dua garis merah 																		
6. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poliklinik/Rawat Jalan 2. UGD 3. Rawat Inap 4. Laboratorium 																		
7. Rekaman Historis Perubahan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Halaman</th> <th>Yang Dirubah</th> <th>Perubahan</th> <th>Diberlakukan Tgl.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				No	Halaman	Yang Dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.										
No	Halaman	Yang Dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.															

	PEMERIKSAAN HBsAg																		
	SOP	No. Dokumen	:	445/PKM-KPR/I/2020/															
		No. Revisi	:																
		Tanggal terbit	:	27-01-2020															
Halaman		:	1/2																
UPTD Puskesmas Kampar				<u>Drg. Rita Herawati</u> NIP.197501012005012012															
1. Pengertian	Prosedur ini mengatur penangan pemeriksaan HBsAg																		
2. Tujuan	Untuk mengukur adanya antigen hepatitis B dalam darah																		
3. Kebijakan	SK Kepala UPTD Puskesmas Kampar Nomor SK/PKM-KPR/UKP-VIII/150 Tentang Jenis-jenis Pemeriksaan Laboratorium.																		
4. Referensi	Panduan tes HBsAg																		
5. Langkah-langkah/ Prosedur	1. Alat dan Bahan <ul style="list-style-type: none"> a. Reagen HBsAg b. Mikro pipet c. Lancet d. Alkohol pad e. Darah vena/ kapiler f. Lancet/ spuit g. Tissue 2. Langkah-langkah <ul style="list-style-type: none"> a. Siapkan reagen cassate HbsAg b. Tulis identitas pasien c. Ambil darah vena atau darah kapiler d. Masukkan 100 ul darah ke dalam sumur cassate e. Kemudian tunggu 15 menit, lalu baca hasil. Hasil : Non reaktif: munculnya garis satu merah Reaktif: munculnya dua garis merah																		
6. Unit Terkait	1. Poliklinik/Rawat Jalan 2. UGD 3. Rawat Inap 4. Laboratorium																		
7. Rekaman Historis Perubahan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Halaman</th> <th>Yang Dirubah</th> <th>Perubahan</th> <th>Diberlakukan Tgl.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				No	Halaman	Yang Dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.										
No	Halaman	Yang Dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.															

		PEMERIKSAAN SPYLIS																	
		SOP	No. Dokumen	:		445/PKM-KPR/I/2020/													
No. Revisi	:																		
Tanggal terbit	:		27-01-2020																
Halaman	:		1/2																
UPTD Puskesmas Kampar					<u>Dr. Rita Herawati</u> NIP.197501012005012012														
1. Pengertian	Prosedur ini mengatur penangan pemeriksaan spyilis																		
2. Tujuan	Untuk mengukur adanya antigen spyilis di dalam darah																		
3. Kebijakan	SK Kepala UPTD Puskesmas Kampar Nomor SK/PKM-KPR/UKP-VIII/150 Tentang Jenis-jenis Pemeriksaan Laboratorium.																		
4. Referensi	Panduan tes Splylis																		
5. Langkah-langkah/ Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat dan Bahan <ol style="list-style-type: none"> a. Reagen spyilis b. Mikro pipet c. Lancet d. Alkohol pad e. Darah kapiler/ darah vena f. Lancet/ spuit g. Tissue 2. Langkah-langkah <ol style="list-style-type: none"> a. Siapkan reagen cassate spyilis b. Tulis identitas pasien c. Ambil darah vena atau darah kapiler d. Masukkan 20 ul darah ke dalam sumur cassate, kemudian tambahkan reagen 20 ul atau 1 tetes e. Kemudian tunggu 15 menit, lalu baca hasil. Hasil : Non reaktif: munculnya garis satu merah Reaktif: munculnya dua garis merah 																		
6. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poliklinik/Rawat Jalan 2. UGD 3. Rawat Inap 4. Laboratorium 																		
7. Rekaman Historis Perubahan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 20%;">Halaman</th> <th style="width: 20%;">Yang Dirubah</th> <th style="width: 20%;">Perubahan</th> <th style="width: 25%;">Diberlakukan Tgl.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				No	Halaman	Yang Dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.										
No	Halaman	Yang Dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.															