
	GM TEST (TES KEHAMILAN)		
	SOP	No. Dokumen : SOP/PKM-KPR/UKP-VIII/2228	
		No. Revisi :	
		Tanggal terbit : 27-01-2017	
Halaman : 1/1			
UPTD Puskesmas Kampar		dr. ALIMORA NIP. 19711123 200312 1 003	
1. Pengertian	Tindakan pemeriksaan kehamilan dengan mengukur kadar HCG dalam urine.		
2. Tujuan	Untuk mengetahui adanya kehamilan yang terlihat melalui Urine.		
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kampar Nomor SK/PKM-KPR/UKP-VIII/ 150 Tentang Jenis-jenis Pemeriksaan Laboratorium.		
4. Referensi	Buku pedoman Laboratorium Klinik , R. GandaSoebrata		
5. Langkah-langkah/ Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat dan Bahan <ol style="list-style-type: none"> a. Pot urin b. Urin c. Strip HCG 2. Langkah-langkah <ol style="list-style-type: none"> a. Celupkan Strip HCG kedalam dinding pot yang telah berisi urine secara perlahan-lahan sampai tanda batas/ garis hitam yang ada pada strip selama 30-60 detik. b. Kemudian angkat strip lalu baca hasilnya sesuai dengan indikator standar: (+) adanya 2 garis merah, (-) garis merah hanya 1. 		
6. Diagram Alur	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto 10px auto;">Celupkan Strip HCG kedalam dinding pot yang telah berisi urine secara perlahan-lahan sampai tanda batas selama 30-60 detik</div> <div style="text-align: center; margin: 0 auto 10px auto;">←</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto 10px auto;">Kemudian angkat strip</div> <div style="text-align: center; margin: 0 auto 10px auto;">←</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: 40px; text-align: center;">(-) garis merah hanya 1</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; text-align: center;">Baca hasilnya sesuai dengan indikator standar</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: 40px; text-align: center;">(+) adanya 2 garis merah</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">←—————→</div> </div>		
7. Hal yang Perlu Diperhatikan	Urine yang digunakan sebaiknya urine pagi hari.		
8. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poliklinik/Rawat Jalan 2. UGD 3. Rawat Inap 4. Laboratorium 		

9. Dokumen Terkait	Register Harian Laboratorium				
10. Rekam Historis Perubahan					
	No	Halaman	Yang Dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.